



CE
1253

VACUCID®

VACUCID® je nepěnlivý, vysoce účinný koncentrát pro stomatologické sací systémy. Současně čistí, dezinfikuje a zbavuje sací potrubí zápachu. Jeho denním používáním se likvidují pevné látky a zabraňuje se vytváření biovrstvy. VACUCID® zajistí, že sací potrubí zůstává čisté, dezinfikované a bez nepříjemných zápachů.

Vlastnosti produktu:

- Ekonomické 2% ředění
- Vhodné pro každodenní použití
- 5 litrů VACUCID® vystačí až na 250 aplikací
- Neobsahuje fenoly, aldehydy ani chlór
- Označení CE - Vyhovuje směrnicím o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS - Třída IIa
- Výrobek odpovídá evropským standardům

Složení:


Kvartérní chlorid amonný 45.4mg/g, biguanid 4 mg/g, expicenty, neobsahuje žádné iontové a kationtové povrchově aktivní látky.

Účinnost:

Baktericidní
Mykobakterium tuberkulóza (TBC)
Bílé kvasinky
HIV-1
HBV
BVDV * (HCV)

* BVDV: Surogát hepatitidy C

Doba působení

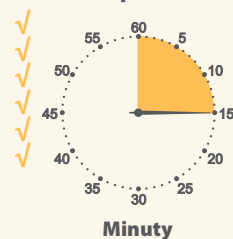

Balení:

1L láhev
5L kanystr
Dávkovací pumpička



UNIDENT SA Rue François-Perréard 4, Case postale 142, CH - 1225 Chêne-Bourg
Tel +41 22 839 79 00 Fax +41 22 839 79 10 Email info@unident.ch Web www.unident.ch

05/2011-01-CZ

UNIDENT
SWISS

VACUCID®

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím:

Nasadte si ochranné rukavice.

Použití:

VACUCID® je koncentrovaný roztok používaný k dezinfekci, čištění a dezodorizaci dentálních sacích systémů.

Bezpečnostní opatření:

Řiďte se pokyny týkající se zdraví a bezpečnosti (Bezpečnostní listy) a bezpečnostními opatřeními, které naleznete na etiketě výrobku. Výrobek je klasifikován jako nebezpečný, podle evropské směrnice 99/45/EHS a jejích úprav. Určen pouze pro profesionální použití.

Vyhovuje evropským normám:


Baktericidní: EN 1040, EN 13727,
EN 14561
Kvasinky: EN 1275, EN 13624,
EN 14562

Fyzikální údaje:


Barva: světle žlutá
Vůně: slabě parfémovaný
Hodnota pH: 2.0 (koncentrát)
Skladování: +5°C až +35°C
Doba skladování: koncentrát: 3 roky
zředěný a nepoužitý roztok: 7 dní
Obal: vyroben z recyklovatelného materiálu



1: Naředte VACUCID® na 2% (20ml na litr vody)

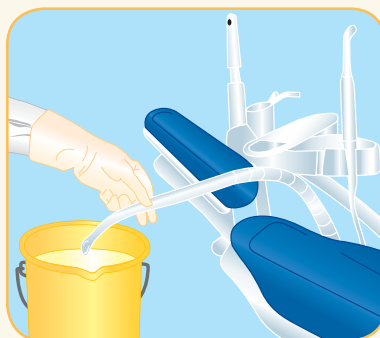


2: Použijte připravený zředěný roztok. Odsávacíčkou odsajte 1 litr.

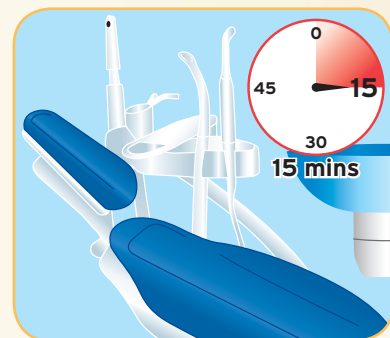

3: Nechte roztok působit nejméně po dobu 15 minut. Roztok také můžete nechat působit přes noc.



4: Připravte si minimálně 1 litr čisté vody.

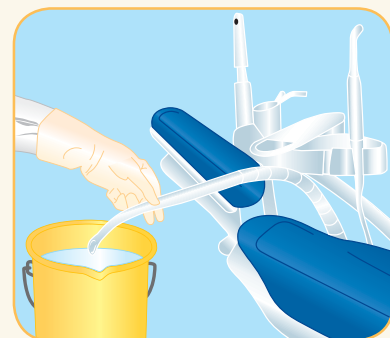

5: Systém vypláchnete tak, že odsávacíčkou odsajte 1 litr čisté vody.



CE1253



UNIDENT SA Rue François-Perréard 4, Case postale 142, CH - 1225 Chêne-Bourg
Tel +41 22 839 79 00 Fax +41 22 839 79 10 Email info@unident.ch Web www.unident.ch

05/2011-01-CZ

UNIDENT
SWISS